

De CUB in gebruik:

De CUB is makkelijk in gebruik en eenvoudig op te blazen met de bijgeleverde pomp. De 2 kamers zijn van elkaar gescheiden en hebben ieder een ventiel. Hierdoor kan de hoogte gevarieerd worden. De CUB biedt een grote stabiele, ergonomische basis voor het beste comfort en stabiliteit.

Door de dubbele laag aan zowel de boven-als onderkant is het het risico op lekken minimaal. Na gebruik is de opgeblazen CUB eenvoudig te reinigen met water, antibacteriele spray of doekjes of een oplossing van bleekwater.

Verpakking bevat:

- 1 CUB support,
- Opblaaspomp
- Reparatieplakker
- Gebruikershandleiding (Nederlands)
- Informatieboekje voor ouders (Engels)
- Informatieboekje voor zorgprofessionals (Engels)
- Badstof hoes
- DVD- CUB animatie

Product specifications

Maximum gebruikersgewicht 120 kg
Gewicht product: 2 kg
Materiaal 0,500 mm biocompatible PVC
Zitting- en vloerzijde bestaan uit een dubbele laag
TTwee gescheiden, afzonderlijk opblaasbare, kamers
Voldoet aan EN71

De informatie in dit boekje is alleen voor informatieve doeleinden en is geen vervanging voor professioneel, deskundig advies. Als u zich zorgen maakt over uw zwangerschap kunt u contact opnemen met uw zorgverlener. De CUB mag nooit gebruikt worden als kinderspeelgoed.

Meer weten? Kijk op www.CUB-support.com

PrettyMum BV, Postbus 36166, 1020 MD Amsterdam
Tel: 020 -7720107info@prettymum.nl / www.prettymum.nl



Design by designfanatics.co.uk



Comfortable Upright Birth

Informatiebrochure



Beter voor Mama, Beter voor Baby

Wat is CUB?

De CUB is een comfortabele, veelzijdige, opblaasbare ondersteuning, speciaal ontworpen om moeders te helpen bij een natuurlijke bevalling.

Hoe kan de CUB helpen bij een natuurlijke bevalling?

De CUB ondersteunt de moeder gedurende de gehele bevalling bij de diverse houdingen die ze zou kunnen aannemen om de weeën op te vangen en te persen. Wanneer de moeder mobiel is, van houding kan wisselen en goed ondersteund wordt, zal zij zelf de houding kiezen die dan het beste bij haar past en dat voelt goed.

Een verticale positie vergroot de ruimte in het bekken en resulteert veelal in een vlottere en veiligere bevalling met minder kans op complicaties of ingrijpen. En dat is goed voor moeder en voor de baby.

De CUB kan gedurende de gehele bevalling worden gebruikt als comfortabele steun, om op te zitten, te rusten, voorover op te leunen maar ook om de te bevallen. Overstappen op een harde baarkruk is niet nodig.

De CUB kan zowel thuis, in het geboortehotel als in het ziekenhuis gebruikt worden.

Ook tijdens de zwangerschap kan de CUB al gebruikt worden om ontspannen op te zitten.

Voordelen van de houdingen die je met CUB kan aannemen

- De beschikbare ruimte in het bekken neemt 28 – 30% toe.
- De weeën zijn effectiever en minder pijnlijk!
- De baby ervaart minder problemen en stress.
- De ontsluitingsfase (3 – 10 cm) duurt korter.
- De uitdrijvingsfase duurt korter.
- De kans op medisch ingrijpen neemt met 23% af.
- De kans op een knip wordt met 21% vermindert.
- De kans op een spoedkeizersnede neemt met 29% af.

Wil je weten uit welke onderzoeken dit blijkt? Kijk op www.cub-supoprt.com of neem contact met ons op.

Manieren om de CUB te gebruiken:

KNIELEN ►



ONDERSTEUNING DOOR PARTNER



◀ OP HANDEN EN VOETEN

ONDERSTEUNING DOOR VERLOSKUNDIGE



HURKZIT ►



◀ RECHTOP ZITTEN



RUSTEN ►



▲ LEUNEN OP EEN BED